

たんぱく除去用

SEIKEN / 消耗品・アクセサリ

発泡性アルカリ洗剤

# ハイ・クリーン

血液・油脂除去効果と除菌力  
たんぱく除去用  
発泡性アルカリ洗剤

微細な酵素の泡とアルカリ成分で高い洗浄効果を発揮。温度の影響を受けず、血液蛋白除去力は酵素洗剤以上です。低発泡でぬめりが少なく汚れを浮き上がらせるので洗浄やすすぎが容易です。200倍に薄めて使用。希釈液のPHは11.0以下の弱アルカリです。

成分

非イオン界面活性剤(ヤシ脂肪酸)  
/過炭酸塩/ 炭酸塩



## POINT



強力洗浄  
たんぱく除去



温度の影響を  
受けない



低価格で  
経済的

↑  
ハイクリーン350

↑  
ハイクリーン1000



5g計量スプーン

SEIKEN

商品紹介



内容量  
**1kg**

ハイ・クリーン1000  
(5g計量スプーン付)

..... ¥10,560 税込




内容量  
**350g**

ハイ・クリーン350  
(5g計量スプーン付)

..... ¥4,620 税込

使用方法

01

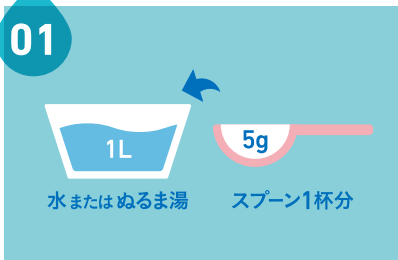


水またはぬるま湯1Lに対しハイ・クリーン5g(付属スプーン1杯分)を溶かし、よく攪拌して希釈液を作ってください。ぬるま湯の方が早く溶けます。

02



希釈液をスプレーボトルに入れ、対象物に噴霧してください。

03

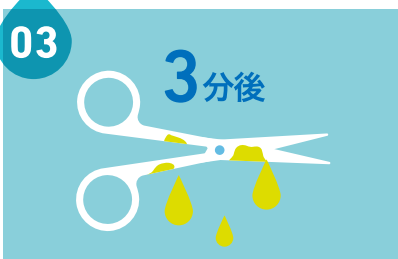

3分ほど経過すると汚れが浮き上がり流れ落ち始めます。

04



流水下で5秒以上すすいでください。

▶ 汚れがひどい場合

汚れがひどい場合はトレーなどの容器に希釈液を入れ、5分ほど浸漬した後、水またはぬるま湯ですすぎ洗いしてください。

▶ 内視鏡を洗浄する場合

やわらかく清潔なガーゼ等に希釈液をたっぷり含ませ、ゆっくりしごき洗いしてください。内視鏡表面を傷付けないよう優しく行うよう注意してください。

その他、内視鏡トローリーのそばに準備し、使用直後の内視鏡チャンネル内の吸引洗浄にもご使用いただけます。

注意事項

- アルミ、銅、亜鉛合金等製品の長時間浸漬は表面のツヤがなくなる場合があります。
- サングラス、オパール、真珠等の宝石類は外して作業してください。
- その他高級品を洗浄する際はあらかじめ目立たない場所でお試しの上使用してください。
- 洗浄後は流水下で5秒以上すすいでください。
- 天然成分を主成分としているためごくまれに異物状の混入が見られる場合がありますがご了承ください。
- 湿気によりハイ・クリーン粉末が固まった場合はほくして使用してください。
- 高温、直射日光を避けて保管してください。
- 保管の際は内蓋をしっかりと閉めてください。
- 使用後は手をよくすすぎ、ハンドクリーム等で皮膚の乾燥をふせてください。
- ハイ・クリーン粉末および希釈液が目に入った場合はすぐに多量の水で洗い流してください。
- 食べ物ではありません。口に入れないようにしてください。
- 誤って飲み込んでしまったり、上記の処置後に異常があった場合はすぐに医師の診断を受けてください。
- 本製品は、取扱者へのMSDSの提供を義務づけた「PRTR制度」「MSDS制度」、及び「労働安全衛生法」、「毒物及び毒劇物取締法」には該当しません。

製品に関するお問い合わせはこちら

**SEIKEN**

株式会社 精研

精研 エスバル

kk-seiken.co.jp

フリーダイヤル

**0120-288-820**

FAX:(052)761-9186 / 受付:9:00~18:00(平日)

製品詳細は  
こちらから



販売代理店